



Comfiwave®

Kompressionsbandage
til nat og hvile

Hvad er *Comfiwave*®?

Comfiwave er en patenteret kompressionsbandage, der er designet til at supplere det kompressionsprodukt, en patient bruger i dagtimerne.

Comfiwave giver et kompressionstryk på **15-21 mmHg**.

Nem på- og aftagning gør Comfiwave til en brugbar løsning, da den giver kompression om natten og er behagelig til afslapning om dagen.



Knælang
Side 10 ►



Lyskelang
Side 12 ►



Tåkappe
Side 14 ►



Shorts
Side 16 ►



Armstrømpe
Side 18 ►



**Armstrømpe
med hånddel**
Side 20 ►



Handske
Side 22 ►



**Lang handske
med fingre**
Side 24 ►



**Arm/handske
med fingre**
Side 26 ►



Mavebånd
Side 28 ►



Brystbånd
Side 30 ►



Halsbandage
Side 32 ►



Kids
Page 34 ►



Til brug om natten

Kronisk ødem går jo ikke i sig selv i løbet af natten og kompressionsbandager lavet til dagsbrug er ikke optimale at sove med. Fortsæt på behageligeste vis kompressionbehandlingen om natten med Comfiwaves bløde og åndbare stof, der giver skånsom kompression, mens du sover.



Til når som helst

Comfiwave-bandager er produceret med patenteret højelastisk garn, hvilket gør dem nemme at tage af og på. -altså perfekt til afslapning i løbet af dagen.

Stoffets åndbarhed betyder, at Comfiwave er egnet til brug året rundt, da den er køligere at have på end traditionelle kompressionsprodukter.

Ud-i-et-strikketeknologi

Nemt farvekoordineret størrelsesskema

f. eks. ■■■ = Large, LANG

Comfiwave's unikke strikning
i bæk og bølge masserer
ødemet og efterlader det med
afmærkninger, hvilket blødgør
vævet.

Comfiwave til underekstremiteterne er
produceret med en høj grad af stabilitet
i ankelområdet. Den er tilpasset ankels
anatomiske form for at hindre, at den generer
henover anklen.

Det laterale og mediale tåområde er
strikket, så det kan strækkes mere,
hvilket kan forhindre tryksår.



Comfiwave® fakta



Nem at tage af og på

Patenteret strik med høj elasticitet gør det nemt at tage Comfiwave på og af.



Fremstillet af blød, ufarvet bomuld

Bomuld mod huden og et sømløst design sikrer maksimal komfort.



Åndbart materiale

Comfiwaves bølgemønster sikrer høj luftgennemstrømning, som virker kølende og giver stræk.

Comfiwave® funktioner



Giver effektiv kompression om natten

Supplerer den kompressionsbehandling, patienten får i dagtimerne



Kan anvendes til palliativ behandling



Kan anvendes under easywrap eller bandage



Jeg er vild med denne bandage. Jeg har haft den på om natten i den sidste uge og det har gjort en enorm forskel!

- Patient med lymfødem

Virkelig behagelig at have på om natten. I modsætning til andre produkter gør den ikke mit ben varmt ved høje temperaturer. Nem at tage af og på. Fremragende produkt

- Patient med lymfødem

“ Brugere fortæller, at Comfiwave er behagelig og nem at bruge, hvilket i sig selv vil forbedrer compliance og selvkontrol af ødemet. ”

“ ...denne type produkt kan bruges alene eller som supplement til andre kompressionsprodukter og døgnet rundt om nødvendigt. ”

Download
kliniske casestudies
og artikel

www.comfiwave.info

British Journal of
Community Nursing

PRODUCT FOCUS

Circumference (cm)	A	C	D	F	G	Limb volume A	Distalities	% difference
Baseline	17.5	17.5	25	29	31.5	2329	1854	+18%
After 2 weeks	17	15.8	24	27.5	21	2139	1853	-8%



through her teenage years with bilateral lower leg oedema and recurrent episodes of cellulitis.

On initial assessment, there was evidence of bilateral lymphoedema below the knee, with both feet showing positive Stemmer's sign, mild hyperkeratosis and post-cellulitis skin discoloration on the left gaiter area. The left leg was 30% bigger than the right, with an ankle circumference of 51 cm and calf of 55 cm. There were distinct skin folds distorting the shape around her left ankle, as well as foot oedema, which was restricting footwear (Figure 4). The limb size also restricted clothing, and the patient was only able to wear very loose trousers or long skirts.

Initial advice of skin care, exercise, elevation and weight management were discussed, and 2 weeks of daily treatment were booked. Miss H was signed off work by her GP to enable her to attend the sessions. Daily treatment commenced in October 2018 and involved alternating days of MLD or intermittent compression using Haldenham LymphFlow Advance, followed by below-knee multi-layer



Figure 5. Miss H wearing Comfiwave on the left leg.

Comfiwave under Easystrip for 2 weeks to compare its with the previous Mobiliderm-Easystrip combination (Figure 5).

The feedback after 2 weeks was that it was a much more comfortable garment combination to wear, and the swelling over the top part of the leg was reduced.



Figure 6. Miss H's legs after using Comfiwave for 2 weeks.

PRODUCT FOCUS

ithin wave patients' to the y were improve better of hat this sent or as 24 hours efficacy in decreasing edema and joint, family


ent a prospective 3-541. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.04.001>

Author J. Examination At home compression 428-435. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.04.001>



Comfiwave® Knælang

	KORT		NORMAL		LANG	
S	CW1-AD2S	■	CW1-AD2R	■	CW1-AD2L	■
M	CW1-AD3S	■	CW1-AD3R	■	CW1-AD3L	■
L	CW1-AD4S	■	CW1-AD4R	■	CW1-AD4L	■
XL	CW1-AD5S	■	CW1-AD5R	■	CW1-AD5L	■

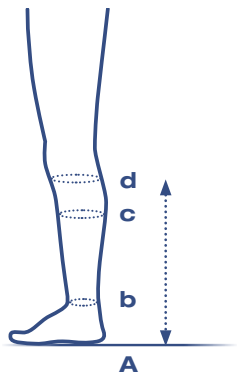

Omkreds cm		S	M	L	XL
c	BREDESTE PUNKT PÅ LÆG	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56
b	ANKEL	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35
Længder cm		KORT	NORMAL	LANG	
A-d	KNÆSTRØMPE	32 - 37	37 - 42	42 - 48	



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg




A-d
Gulv til 2 fingerbredder
under knæhasen



Comfiwave® Lyskelang

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-AG2S	■	CW1-AG2R	■	CW1-AG2L
M	CW1-AG3S	■	CW1-AG3R	■	CW1-AG3L
L	CW1-AG4S	■	CW1-AG4R	■	CW1-AG4L
XL	CW1-AG5S	■	CW1-AG5R	■	CW1-AG5L
XXL	CW1-AG6S	■	CW1-AG6R	■	CW1-AG6L

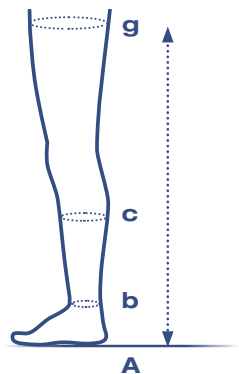

Omkreds cm		S	M	L	XL	XXL
g	TOPPEN AF LÅRET	40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75	72 - 92
c	BREDESTE PUNKT PÅ LÆG	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56	52 - 64
b	ANKEL	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35	27 - 35
Længder cm		KORT		NORMAL		LANG
A-g	LYSKESTRØMPE	64 - 70		70 - 77		77 - 84



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg



g
Toppen af låret



A-g
Gulv til toppen
af låret



Comfiwave® Tåkappe

NORMAL

M

CW1-ZA3



L

CW1-ZA4





Omkreds cm

a FORFOD

M

20 - 27

L

26 - 34



a
Forfod



Comfiwave® Shorts

NORMAL

S

CW1-GT2



M

CW1-GT3



L

CW1-GT4



XL


CW1-GT5



XXL

CW1-GT6



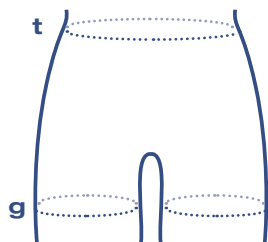

	Omkreds cm	S	M	L	XL	XXL
t Talje		50 - 68	66 - 86	84 - 104	102 - 124	120 - 146
g Toppen af låret		40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75	72 - 92




g
Toppen af låret



Comfiwave® Armstrømpe

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-CG2S	■	CW1-CG2R	■	CW1-CG2L
M	CW1-CG3S	■	CW1-CG3R	■	CW1-CG3L
L	CW1-CG4S	■	CW1-CG4R	■	CW1-CG4L

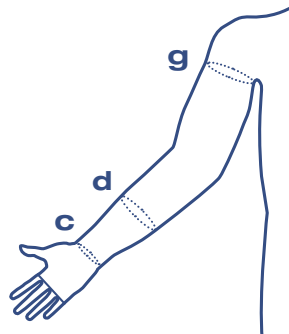

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

Længde cm

KORT

NORMAL

LANG

c-g ARMSTRØMPE

36 - 42

40 - 46

44 - 50



c

Håndled



d

Midt på
underarmen



g

Øverst på
overarmen



c-g


Håndled til
armhulen



Comfiwave®

Armstrømpe med hånddel

	KORT		NORMAL
S	CW1-AH2S	■	CW1-AH2R
M	CW1-AH3S	■	CW1-AH3R
L	CW1-AH4S	■	CW1-AH4R

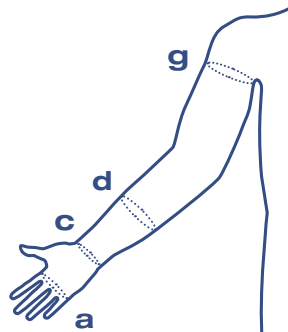

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a OMKREDS AF HÅND VED FINGRENS GRUNDLED

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g

ARMSTRØMPE MED HÅNDEL

36 - 42

40 - 46



a

Omkreds af hånd ved fingrenes grundled



c

Håndled



d

Midt på underarmen



g

Øverst på overarmen



c-g

Håndled til armhule



Comfiwave® Handske

NORMAL

S

CW1-ZC2



M

CW1-ZC3



L

CW1-ZC4





Omkreds cm

b OMKREDS AF HÅND VED
FINGRENE GRUNDLED

c HÅNDLED

S

17 - 22

14 - 20

M

20 - 25

16 - 24

L

23 - 28

22 - 28



b

Omkreds af hånd ved
fingrenes grundled



c

Håndled




Comfiwave®

Lang handske med fingre

NORMAL

S	CW1-ZE2	
M	CW1-ZE3	
L	CW1-ZE4	

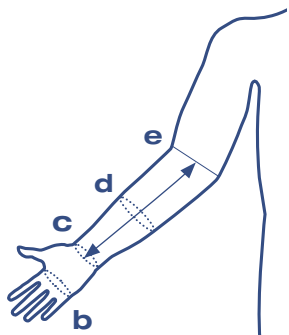

Omkreds cm

S

M

L

b

OMKREDS AF HÅND VED
FINGRENE GRUNDLED

17 - 22

20 - 25

23 - 28

c

HÅNDLED

14 - 20

16 - 24

22 - 28

d

MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 28

26 - 32

30 - 38

Længde cm

NORMAL

c-e

HÅNDLED TIL ALBUE

20 - 24



b

Omkreds af hånd ved
fingrenes grundled



c

Håndled



d

Midt på underarm



c-e


Håndled til
albuebøjning



Comfiwave®

Arm/handske med fingre

	KORT		NORMAL	
S	CW1-ZH2S	■	CW1-ZH2R	■
M	CW1-ZH3S	■	CW1-ZH3R	■
L	CW1-ZH4S	■	CW1-ZH4R	■

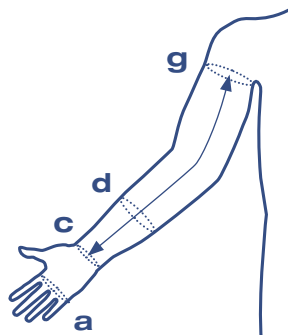

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARM

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a OMKREDS AF HÅND VED
FINGRENE GRUNDLED

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g

ARMSTRØMPE MED
HÅNDEL

36 - 42

40 - 46



b

Omkreds af hånd ved
fingrenes grundled



c

Håndled



d

Midt på underarm



c-e

Håndled til
albuebøjning




Comfiwave® Mavebånd

M	CW1-HT3	■ ■ ■
L	CW1-HT4	■ ■ ■
XL	CW1-HT5	■ ■ ■



Comfiwave® Lår med hofte

	KORT		NORMAL
S	CW1-ET2S	■ ■	CW1-ET2R
M	CW1-ET3S	■ ■ ■	CW1-ET3R
L	CW1-ET4S	■ ■ ■	CW1-ET4R
XL	CW1-ET5S	■ ■ ■	CW1-ET5R

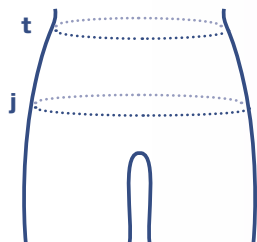

Omkreds cm

t TALJE

M

60 - 75

L

70 - 85

XL


90 - 120

j HOFTER

80 - 100

90 - 105

110 - 140

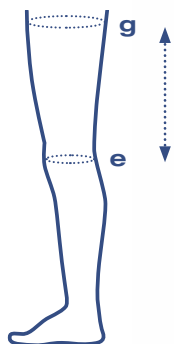

Omkreds cm

g TOPPEN AF
LÅRET

S

40 - 48

M

46 - 56

L

54 - 65

XL

62 - 75

e KNÆ

27 - 35

33 - 39

41 - 50

48 - 60


KORT

NORMAL

e-g LÅRSTYKKE

20 - 26


25 - 31

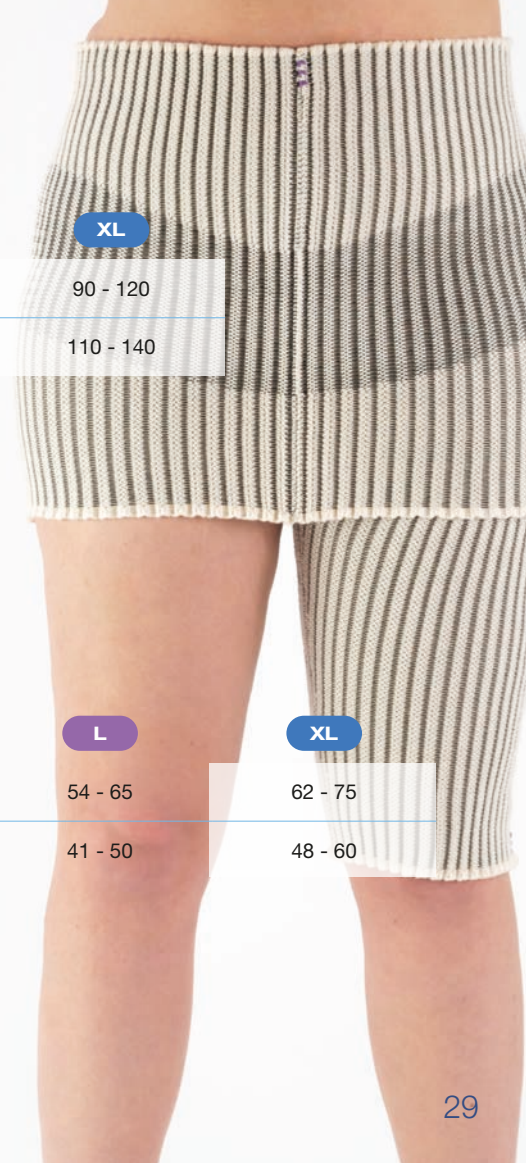



Comfiwave® Brystbånd

S	CW1-TN2	
M	CW1-TN3	
L	CW1-TN4	
XL	CW1-TN5	

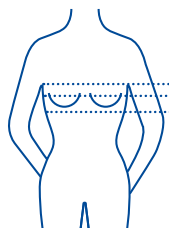

Omkreds cm

S

M

L

XL

OVER BRYST

70 - 88

80 - 102

90 - 116

100 - 130

PÅ BRYST

70 - 92

80 - 108

90 - 126

100 - 144

UNDER BRYST

70 - 80

80 - 92

90 - 104

100 - 116



Over bryst



På bryst



Under bryst



Comfiwave® Halsbandage

KORT

NORMAL

S


CW1-HN2S

CW1-HN2R

M

CW1-HN3S

CW1-HN3R

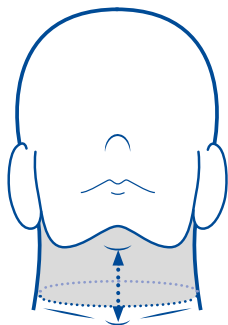

OMKREDS AF HALS OVER
KRAVEBEN

S

32 - 38

M

37 - 43

KORT

5-7

NORMAL

7-9

LÆNGDE AF HALS



Omkreds af hals
over kraveben



Længde af hals



Comfiwave® Kids

Optimeret til spædbørn og børn med en lettere og blødere fornemmelse, der prioriterer komfort under brug.

KORT

P

CW1-AD0S

NORMAL


CW1-AD0R

LANG

CW1-AD0L

EKSTRA LANG

CW1-AD0X

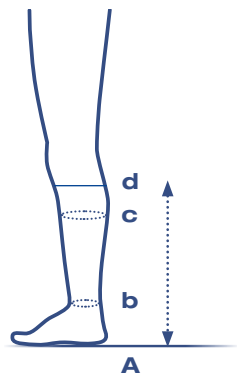

Omkreds cm		BØRN			
c	BREDESTE PUNKT PÅ LÆG	20 - 33			
b	ANKEL	14 - 22			
Længde cm		KORT	NORMAL	LANG	EKSTRA LANG
A-d	GULV TIL 3 FINGERBREDDER UNDER KNÆHASEN	17 - 22	22 - 27	27 - 32	32 - 37



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg



A-d
Gulv til 2 fingerbredder
under knæhasen

Dansk distributør:

Specialbandager.dk A / S

Bindeledet 10
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon: 4444 8850

E-mail: info@specialbandager.dk

www.specialbandager.dk

Comfiwave[®]

Haddenham Healthcare Ltd
4D Drakes Drive
LANG Crendon, HP18 9BA
United Kingdom



www.comfiwave.info



01844 208842



sales@hadhealth.com